

Sie benötigen

- **Zugang zu einem WLAN**
- **Ggf. das Passwort für das WLAN**
- **Ein NFC-fähiges Smartphone**
- **Die OIS Installations App** (Link innen)

Wenn Sie die Zugangsdaten für Ihr WLAN nicht kennen, wenden Sie sich bitte an Ihren Systemadministrator.

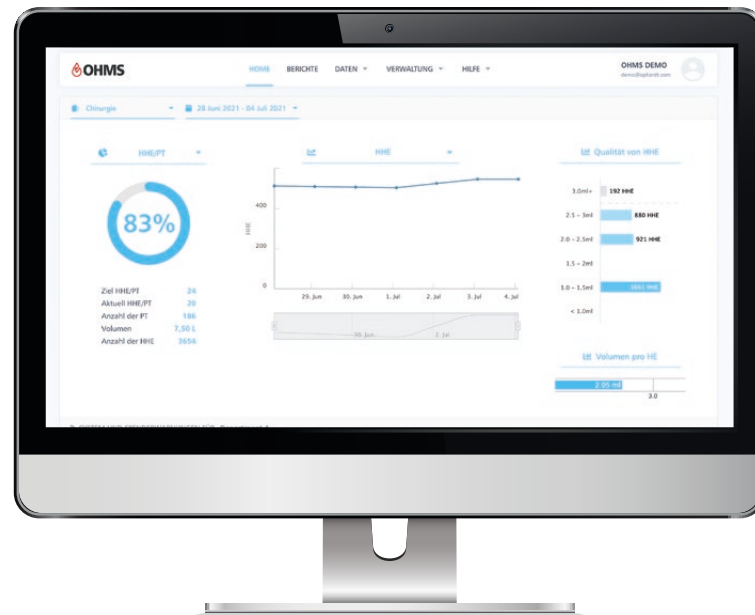
Eine vollständige Anleitung zur SmartNose finden Sie hier:
www.ophardt.com/op-documents/MA_SmartNose.pdf

Hier können Sie Ihre OIS Zugangsdaten eintragen:

Benutzername

Passwort

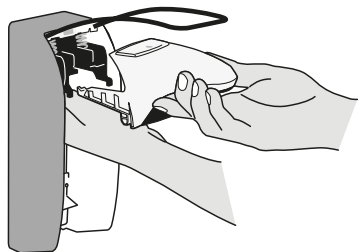
5



Händehygiene anzeigen und analysieren
<https://ohms.ophardt.cloud>



**in wenigen
Schritten
zum smarten
Desinfektions-
mittelspender**

1

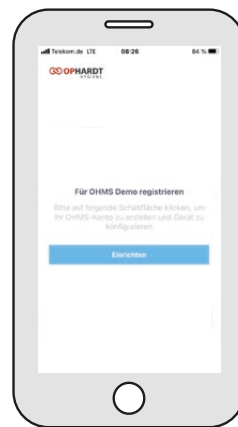
Videoanleitung: QR-Code scannen oder
Link besuchen: <https://youtu.be/ZiwKTgsVLAA>

**Magnet & SmartNose
installieren**

2

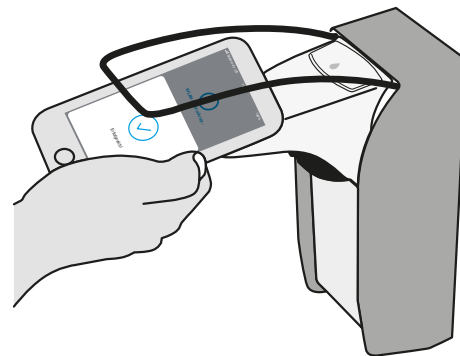
QR-Code scannen oder
im jeweiligen Shop nach OPHARDT suchen.

App laden

3

Nach der Registrierung haben Sie
vollen Zugang zur OHMS® Software.

Anweisungen folgen

4

Durch den Scan wird der smarte Spender
zur OHMS® Software zugefügt.

NFC Scan